

Käyttöohjeet

Zental - Hampaiden valkaisu kynä

1. Pyöritä kynän päässä olevaa rullaa
2. Levitä valkaisu geeliä hampaisiin
3. Anna vaikuttaa 10-15 minuuttia
4. Huuhtelee suu vedellä



Zental - Hampaiden valkaisu liuskat

1. Kuivaa hampaat
2. Irroita valkaisu liuskat suojamuoveista ja kiinnitä hampaisiin
3. Anna vaikuttaa 30 minuuttia
4. Ota liuskat pois
5. Huuhtelee suu vedellä



Zental - Hampaiden valkaisu kotipaketti / valkaisu kotipaketti PLUS

1. Upota hammassuotit 80 C veteen viideksi sekunniksi
2. Anna jäähtyä noin 10 sekuntia (varo polttamasta suutasi!)
3. Aseta hammassuotit suuhun
4. Muovaa ja painele hammassuotit hampaisiisi sormia ja kieltä apuna käyttäen
5. Sulje suu ja ime ilma pois muottien välistä optimaalisen istuvuuden saamiseksi
6. Leikkaa hammassuotista ylimääräinen ainesosa pois ienrajaa pitkin
7. Aseta hammassuotit paikoilleen
8. Anna vaikuttaa 30 minuuttia
9. Huuhtelee suu vedellä

